

KAN KÜLTÜR ALMA TEKNİĞİ



BD BACTEC™ 9000 Media Selection

Kat.No.	Plus Aerobic/F 442192	Plus Anaerobic/F 442193	Lytic/10 Anaerob/F 442265	PEDS PLUS/F 442194	Mycosis IC/F 442206 - 442026	Myco/F Lytic 442003
Kullanımı	Setin ilk standart şişesi: Genel kan kültür besiyeri içerisindeki reçineler ile hasta kanındaki olası antibiyotığı nötralize eder. Aerop tüm bakterilerin izolasyonu için.	Setin ikinci opsiyonel şişesi: Hasta antibiyotik almış ise içerisindeki reçineler ile hasta kanındaki olası antibiyotığı nötralize eder. Anaerop ve fakültatif anaerop bakterilerin izolasyonu için.	Setin ikinci opsiyonel şişesi: Hasta antibiyotik almamış ise içerisindeki saponin ile daha fazla bakterinin açığa çıkmasını sağlar. Anaerop ve fakültatif anaerop bakterilerin izolasyonu için.	Pediyatrik ve 3 ml'den az miktardaki kan ekimleri için standart şişe: Aerop ve mantar izolasyonu için.	Setin üçüncü opsiyonel şişesi: Özellikle immünsuprese ve nütropenik hastalarda daha erken ve hızlı mantar izolasyonu için özel antibiyotik katkılı.	Setin üçüncü opsiyonel şişesi: İmmünsuprese hastalarda mikobakteri izolasyonu için özel katkı.
Gerekli kan hacmi	3 - 10 ml Optimum 8 - 10 ml	3 - 10 ml Optimum 8 - 10 ml	3 - 10 ml Optimum 8 - 10 ml	1 - 3 ml	3 - 10 ml Optimum 8 - 10 ml	1 - 5 ml

